


Manuel d'utilisation CEFALY

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, veuillez lire le manuel d'utilisation CEFALY pour obtenir des instructions détaillées.

Préparation et utilisation

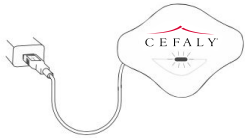

- 1) Chargez complètement votre appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation et du câble fourni avant de l'utiliser pour la première fois. Une fois branché, le témoin lumineux vert se mettra à clignoter. Une charge complète (environ 3 heures) est signalée par un témoin lumineux vert qui ne clignote plus.



- 2) Avant CHAQUE séance, lavez votre front (entre et au-dessus de vos sourcils) à l'eau et au savon, puis séchez soigneusement.



- 3) Ouvrez l'emballage de l'électrode réutilisable, retirez le support en plastique et décollez délicatement l'électrode. Conservez l'emballage et le support pour pouvoir ranger et réutiliser l'électrode.



- 4) En vous aidant d'un miroir, positionnez l'électrode de telle sorte à ce que la base de l'électrode se situe entre vos sourcils, et ses ailes au-dessus de vos sourcils. Une fois l'électrode en place, utilisez vos doigts pour vous assurer qu'elle adhère parfaitement à votre peau.



- 5) Rapprochez ensuite l'appareil de votre front en veillant à ce que les aimants au dos de l'appareil soient tournés vers la zone de contact magnétique sur la face avant de l'électrode. L'appareil sera automatiquement attiré vers l'électrode et se positionnera tout seul. Une fois fixé, sélectionnez et lancez le programme de traitement de votre choix.

L'appareil s'éteindra automatiquement à la fin de la séance de traitement. Vous pouvez retirer l'appareil en l'écartant de l'électrode. Décollez ensuite l'électrode de votre front et replacez-la sur son support en plastique. Glissez le support à l'intérieur de l'emballage, puis rangez le tout dans un sachet en plastique hermétique.


✔ UTILISATION – Le CEFALY est préconisé pour :

- Le traitement des crises de migraine avec ou sans aura chez les patients âgés de 18 ans et plus.
- Le traitement préventif de la migraine épisodique chez les patients âgés de 18 ans et plus.

Conseils pour un traitement efficace


Utilisez le programme de CRISE dès le début d'une migraine.

- Ce programme de 60 minutes est conçu pour soulager rapidement les crises de migraine.
- Pour activer le programme de CRISE, appuyez une fois sur le bouton de l'appareil.
- Un bip unique indique la sélection du programme de CRISE.
- Après quelques instants, le témoin lumineux de l'appareil se mettra à clignoter une fois pendant toute la durée de la séance.
- Utilisez le programme de CRISE durant son cycle complet, soit 60 minutes.

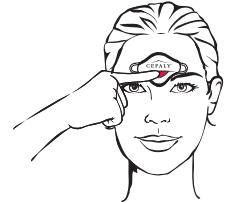

Utilisez le programme de PRÉVENTION en-dehors des crises de migraine.

- Ce programme de 20 minutes est conçu comme traitement préventif de la migraine.
- Pour activer le programme de PRÉVENTION, appuyez deux fois sur le bouton de l'appareil.
- Deux bips indiquent la sélection du programme de PRÉVENTION.
- Après quelques instants, le témoin lumineux de l'appareil se mettra à clignoter deux fois pendant toute la durée de la séance.
- Une utilisation quotidienne régulière du programme de PRÉVENTION peut aider à réduire le nombre de jours de migraine.

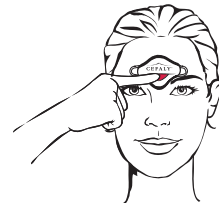

Points importants

- Si vous ressentez une gêne durant les 14 premières minutes du traitement alors que l'intensité augmente, appuyez immédiatement une fois sur le bouton de l'appareil (un bip) afin de stabiliser l'intensité pour le reste de la séance.
- Nous vous conseillons d'augmenter l'intensité petit à petit sur plusieurs jours et plusieurs séances de traitement afin d'atteindre un niveau de traitement optimal à un seuil maximal tolérable.
- L'intensité peut également être contrôlée manuellement. Après 10 secondes à compter du début du programme, appuyez sur le bouton de l'appareil et maintenez-le enfoncé jusqu'à atteindre le niveau d'intensité désiré (succession de bips rapides). L'intensité maximale sera atteinte après avoir maintenu le bouton enfoncé pendant environ 30 secondes (ou jusqu'à l'arrêt des bips).
- Pour arrêter ou interrompre une séance de traitement à tout moment, retirez l'électrode de l'appareil. (L'appareil émettra une série de bips pour indiquer l'interruption de la séance).
- Plusieurs semaines d'utilisation adaptée et régulière peuvent être nécessaires pour constater une amélioration sensible.

✘ CONTRE-INDICATIONS – N'UTILISEZ PAS LE CEFALY SI :

- Vous avez un appareil métallique ou électronique implanté dans la tête.
- Vous souffrez de douleurs d'origine inconnue.
- Vous portez un stimulateur cardiaque, ou un défibrillateur implanté ou portable. Ceci risquerait de provoquer des interférences avec le stimulateur, de causer un choc électrique, voire d'entraîner la mort.

Besoin d'aide ?

www.cefaly.com | E-mail : cs@cefaly.com
Appel gratuit : 1-844-475-7100, du lun. au ven. de
9 h 00 a.m. à 5 h 00 p.m. (heure de l'Est)

CEFALY
TECHNOLOGY

Pour de plus amples informations concernant les indications d'utilisation de l'appareil, les mises en garde, et les contre-indications, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter CEFALY.